


SIXPAD

取扱説明書 (保証書付き)

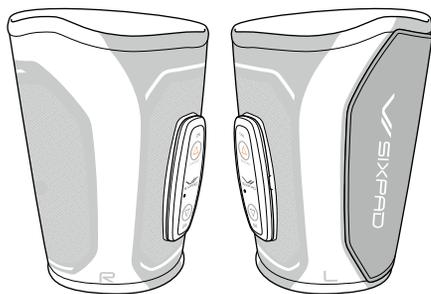

Leg Belt 2 レッグベルト2 SE-CM

本品は電気刺激を通じて、太もも(表・裏・内もも)の筋肉をトレーニングすることを目的としています(医療機器ではありません)。



ご使用前に必ず本書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

• 本品は屋内用です。

もくじ

同梱品・付属品.....	5
安全上のご注意.....	6
使用上のご注意.....	15

お
使
い
の
前
に

ご使用のながれ.....	16
準備する.....	17
使用する.....	18
ご使用後は(本品のお手入れ・保管).....	29
お知らせ.....	31



使
い
か
た

故障かな?と思ったら.....	36
仕様一覧.....	42
保証・アフターサービス.....	44
無償修理規定.....	44
保証書.....	裏表紙

必
要
な
と
き

太もも全体の筋肉を集中的に鍛える

主なアプローチ部位

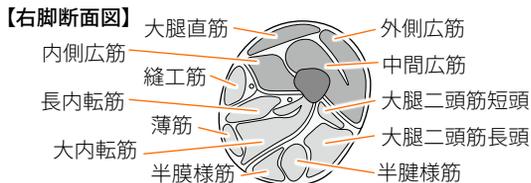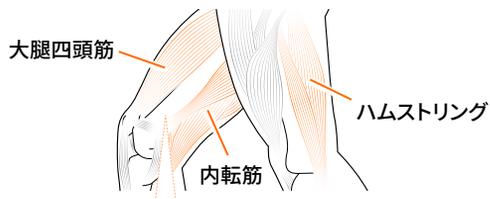

大腿四頭筋

太ももの前面にある、中間広筋、内側広筋、外側広筋、大腿直筋の4つの筋肉から構成される筋群。人体で最も体積が大きく、「太もも」のシルエットを形成する筋群。膝を伸ばす動きや脚を前に上げる動きのときに働き、ジャンプやダッシュなどあらゆるスポーツで重要な筋肉。

ハムストリング

太ももの裏にある、半膜様筋、半腱様筋、大腿二頭筋の3つの筋肉から構成される筋群。太もも(ハム)の裏側にある膝近くの腱(ヒモ=ストリング)を形成していることが筋名の由来。股関節や膝関節の運動において大腿四頭筋とは反対の働きをする拮抗の関係。

内転筋

太ももの内側にある、大内転筋、長内転筋、短内転筋、恥骨筋、薄筋の5つの筋肉から構成される筋群。股を閉じる動作や平泳ぎのキック、ランニングで太ももを前方に振る動きのときに働く。

よくあるご質問

Q1：1日に何回使用できますか？

A1：1日1回まで、以下の時間を目安に使用できます。

- レッグベルト2のみで：15分
- フットフィット3シリーズも同時に：

トレーニング・プログラム 15分

コンディショニング・プログラム 12分

※フットフィット3 ヒートのウォーキング・プログラムは、レッグベルト2と同時使用できません。

過度のご使用は筋肉疲労を起こし事故や身体トラブルのおそれがあります。

Q2：タイツなど衣類の上から使用できますか？

A2：できません。電極部分が直接肌に密着することで通電するので、必ず素肌の上に着用してください。

Q3：どれくらいの刺激の強さ(レベル)で使用したらよいですか？

A3：人によって最適レベルは異なります。初めてお使いになるときは、弱いレベルで使用してください。慣れてきたら、前太ももの筋肉が動いているのを確認しながら、レベルを調節していきましょう(詳しくは31ページをご覧ください)。

本品でEMSが通電するしくみ

使用直前に肌を湿らせ、水分を通じて電気刺激を伝えます。



※室温や体調などで、刺激を感じにくいことがあります。

電気刺激が感じられない、ピリピリ感が起きる、肌検知のエラー音「ピッ、ピッ（連続音）」が鳴るときは？

1 電極部が肌にしっかり押し当てられているか



面ファスナーを少し締め気味の位置に貼りなおし、電極部を肌へしっかり押し当ててください。

2 肌の湿り具合が不足していないか

肌表面の水分量不足 肌全体をさらに湿らせる



ウエットティッシュ、濡らした布等で電極部が当たる付近の肌全体をさらに湿らせてください。

アプリのご案内



つづけるコツは、アプリで管理すること。

SIXPAD CLUB

SIXPAD CLUBは、Bluetooth®で製品とつながり、あなたのSIXPADトレーニングライフをさらに充実させる、さまざまな機能を兼ね備えたアプリです。



アプリ
ダウンロード

- 01 保証期間の延長※
- 02 製品とのアプリ連携
- 03 トレーニングログ機能

※延長保証の対象商品は2次元コードからご確認いただけます



本製品はSIXPAD CLUBのトレーニング機能に対応しています。

アプリの登録手順は4ページをご覧ください。

SIXPAD CLUBでトレーニングをアプリと連携する

- 1 アプリをダウンロード
- 2 会員登録(無料)～ログイン



アプリ
ダウン
ロード



・サービス向上のため、画面内容を変更することがあります。ご了承ください。

- ②画面
メールアドレスのご登録状況を選びます。
弊社他サービスにご登録済みの際は、メールアドレスなどの登録済み情報を読み込みます。
- ・新規会員登録(以下へ未登録)
 - ・MTG ONLINESHOP、またはMy ReFaアプリ、SIXPAD Health Coachアプリ
 - ・SIXPAD HOME GYM
- ③画面
画面のガイダンスに沿って、入力してください。

SIXPAD CLUBの多様なファンクション

一例をご説明します。

[A] アプリトレーニング

- ・リモート操作
- ・トレーニングの可視化(レベル、残時間)



[B] 延長保証登録*



以降は画面のガイダンスに沿って登録します

*通常メーカー保証期間を延長するキャンペーンです。当キャンペーンは予告なく終了、または内容や条件を変更することがあります。ご了承ください。


同梱品・付属品

生地本体の箱に入っているもの

同梱品

生地本体 (2枚)


<表面>

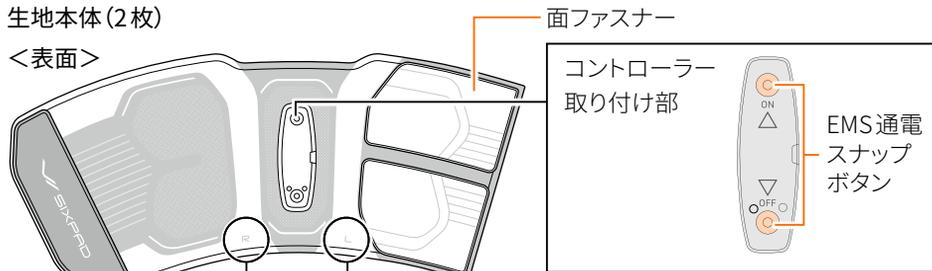

位置合わせ目印

• 着用位置の目印です。右脚時は「R」、左脚時は「L」を太ももの中央に合わせます。


<裏面>

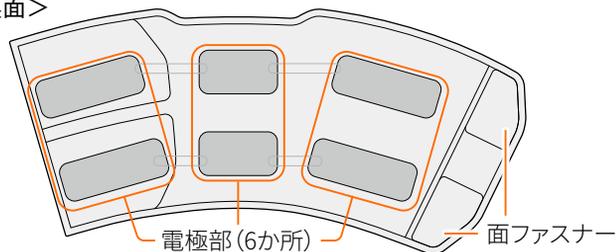

生地本体とコントローラーに左右の区別はありません。


コントローラー (別売) の箱に入っているもの
同梱品

レッグベルト2専用
コントローラー (2台)

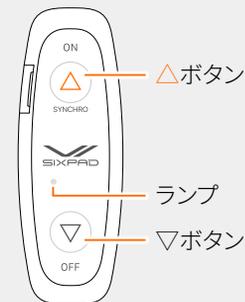

付属品

専用充電用USBケーブル (1本)

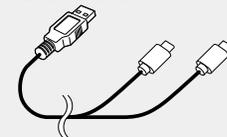

取扱説明書 (1冊)



付属品

• 洗濯ネット (1枚)



• 取扱説明書 (本書) (1冊)



安全上のご注意

誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。

ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、以下の表示で区分して説明しています。



危険

死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。



警告

死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

軽傷を負う可能性や、財産の損害の発生が想定される内容です。

守っていただく内容を、以下の図記号で説明しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



注意を促す内容があることを告げるものです。



行為の強制や指示を告げるものです。

免責事項

火災、地震、暴動・テロなどの行為、その他の事項など、お客様の故意、または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。

使用する方についてのご注意

併用してはいけない方



危険

次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。

事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。



- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- 人工心臓などの生命維持用医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器

上記に当てはまる方は、本品を使用中の方にも触れないでください。

本品を近づけてはいけない機器



危険



- 本品を、ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を装着した方の装着部位に近づけないでください（本品と装着部位は22cm以上離してください）。

使用してはいけない方

 **警告** 次のような方は使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

-  医師にEMS機器の使用を禁じられている方
- 太ももにボルト等の金属を埋め込んでいる方
- 妊娠中の方、出産直後の方
- 使用部位（電極部が当たる部位とその周辺）に傷などの異常がある方（やけど、水疱、病変、切開、創傷、活動性皮膚疾患または皮膚感染など）
- 小さなお子様、ご自分で「取扱説明書」（本書）の内容を理解できない方
- 飲酒している方
- 発熱（38℃以上）している方

使用してはいけない部位

 **警告** 次のような部位に電極部が当たらないよう、着用時に電極部の位置を調整してください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

-  傷口や陰部などの粘膜部位
- 当日、脱毛処理をした部位
- 整形手術をした部位
- インプラントや金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んである部位

本書で指定している部位以外には使用しないでください。

安全上のご注意(つづき)

使用する方についてのご注意(つづき)

医師にご相談いただきたい方



警告

次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。



- 悪性腫瘍のある方
- 心臓疾患のある方、またはその疑いがある方
(心臓に痛みや動悸などの違和感を感じる方等)
- 心臓疾患の既往歴がある方
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- 静脈血栓症の方、またはその疑いがある方
- 脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
- 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- 使用部位(電極部が当たる部位とその周辺)をけがしている方、または手術したことがある方(半月板や靭帯損傷、人工関節置換術など)
- 通常歩行ができないほどひざの痛みが強い方
- 脊椎ならびに脚部の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼(とう)痛性)疾患のある方
- 血圧に異常がある方
- 介護を受けている方、または付き添いなしで日常生活ができない方
- 太もも以外の体内にボルト等の金属を埋め込んでいる方
- 皮ふに知覚障害や異常(感染症、皮ふ炎や傷など)のある方
- 血行障害のある方
- 電極部が肌に合わない方
- 使用部位(電極部が当たる部位とその周辺)に刺青(タトゥー)を入れている方
- アレルギー体質の方
- 安静を必要とする方
- 身体に異常を感じている方
- 医師に運動を禁じられている方
- 長期間、運動していない方
- その他医療機関で治療中の方

上記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

ご使用いただく際のご注意

 **警告** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  ・コントローラーを操作する際は、座った状態で行ってください。
- ・コントローラーの電源を入れた後、何も操作していないのに本品が動作した場合は、他の製品などと混線している可能性があります。この場合は、ただちに「ピー」と音がするまでコントローラーの▽ボタンを長押しして本品の電源を切ってから、本品の電源を入れ直してください。そのまま使い続けると、事故やケガのおそれがあります。
※本品はシンクロ機能を搭載しています。シンクロ機能で連携されているコントローラーが別のコントローラーやフットフィット3の操作で動作するのは正常です。
- ・トレーニングを開始する前に、肌が検知されていることを必ず確認してください。本品では肌が検知されていないと「ピッ、ピッ」と連続音が鳴って未検知をお知らせします。



警告：トレーニング開始前に肌が検知されていることを必ず確認してください。

- ・必ずコントローラーのUSBカバーを閉めた状態で、トレーニングを行ってください。また、充電用USB端子が露出した状態のままにしないでください(市販品等の接続を含む)。
※ 充電用USB端子が露出したままトレーニングを行うと、やけど、感電のおそれがあります。

 **警告** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  ・本品にレッグベルト2専用コントローラー以外の製品を取り付けて使用しないでください。思わぬ事故や故障のおそれがあります。
- ・本品のご使用时、特にレベルを高く設定した場合、急な筋肉の収縮により身体が意図しない動きをするおそれがあります。下記のような動作中は、本品を使用しないでください。
 - 調理や熱い飲み物・食べ物の飲食
 - 刃物や工具の使用
 - 階段の上り下り、高所、または不安定な場所での作業
 - その他、意図せず身体が動いた場合に危険が伴う動作

安全上のご注意(つづき)

ご使用いただく際のご注意(つづき)

 **警告** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  お子様の手の届くところに置かないでください。やけどのおそれがあります。
- 着用した本人以外が、本人の同意なしに電源を入れたり、レベルを上げたりしないでください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。
- 分解、改造、修理はしないでください。事故やケガのおそれがあります。
- 落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガのおそれがあります。
- 電極部にUSBケーブルや金属類を接触させないでください。感電のおそれがあります。
- 弊社推奨品以外の電気製品・美容機器などは併用しないでください。気分が悪くなったり、体調不良をおこしたりするおそれがあります。
- 自動車などの運転中は使用しないでください。
- 浴室など湿度の高いところでは使用しないでください。



警告：本品を、バスタブ、シャワー、あるいは水を張った容器の中で使用しないでください。

 **注意** 次の注意事項を守って、使用してください。事故やケガ、感電、破損、汚れなどのおそれがあります。

-  極度の空腹時や絶食時、糖質制限をしている場合はご使用をお控えください。
- 眠気があるときは使用しないでください。
- 電子レンジなどで温めたり、火気に近づけたりしないでください。
- 用途目的以外の使用や、本書の使用方法以外で使用しないでください。
- 小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本品で遊ばないようにしてください。
- トレーニング中は手で電極部に触れないでください。感電のおそれがあります。
- コントローラー周辺が濡れた状態で使用しないでください。
- 1日60分以上連続して使用しないでください。
- トレーニング中に面ファスナーを緩めたりしないでください。電極部が肌に密着できず、強い刺激や痛みを受けるおそれがあります。

⚠ 注意 次の注意事項を守って、使用してください。

- **!** 本品は消耗品です。長期使用にともない、本品が劣化(破れている、ほつれて内部部品が見えているなど)した場合は、使用を中止して廃棄してください。電極部がひび割れたり、生地部が伸びたりするなどした場合は、体感に変化する可能性があります。体感に変化していると感じられたら、使用を中止してください。※買い替えの際は、生地本体のみご購入ください。お手元のコントローラーは引き続きご使用いただけます。
- 使用前にキズや変形などがいないか確認してください。そのまま使用し続けると、事故やケガのおそれがあります。
- 本品を使用するときは、アクセサリー類(ネックレス、ピアス、ベルトなど)を外してください。事故やケガ、破損などのおそれがあります。
- 周囲に家財などが無い、安全な場所で使用してください。
- 使用部位(電極部が当たる部位)を十分湿らせた状態で使用してください。湿らせていないと、強い刺激や痛みを受けるおそれがあります。
- 使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症、あざ(内出血)などの異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用を続けると症状の悪化につながるおそれがあります。
- 本品から異臭、異音がする場合は、ただちに電源を切り、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。ショートや故障、発火のおそれがあります。
- 本品は、肌に密着して使用するため、発汗量が増える場合があります。着用時は脱水症状を防ぐため、トレーニング中はこまめな水分補給を行ってください。
- 身体や肌に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良の原因となるおそれがあります。
- むやみにレベルを高くしたり、連続で何度も使用したりすると、筋肉疲労や、皮ふのヒリヒリ感、赤みの原因となるおそれがあります。
- 使用後は、必ず電源を切り、コントローラーを取り外してから脱いでください。事故や故障のおそれがあります。
- 汗などで手が濡れていたら、必ずよく拭いてからコントローラーを取り外してください。感電のおそれがあります。
- 本品は洗濯できます。洗濯後は、しっかり乾燥させてからご使用ください。

安全上のご注意(つづき)

専用コントローラー (別売) についてのご注意

 **警告** コントローラーは充電式電池を内蔵していません。次の注意事項を守って、使用してください。

-  火中投入や加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱や発火、破裂のおそれがあります。
- コントローラーは、防水仕様ではありません。水回りや浴室、湿度の高い場所に持ち込んだり、使用しないでください。事故や感電、発火、故障などのおそれがあります。
- コントローラーに水をかけたり、水の中に入れてください。感電や故障、火災のおそれがあります。



警告：コントローラーを、バスタブ、シャワー、あるいは水を張った容器の中で使用しないでください。

 **警告**

次のような場合は、コントローラーから専用充電用USBケーブルを抜いてください。事故や感電、発火などのおそれがあります。

-  水や異物がコントローラーや専用充電用USBケーブルに入ったり、かかったりした場合
- 雷が鳴り出した場合
- 停電になった場合
- 専用充電用USBケーブルが損傷または断線した場合
- 充電中にランプが赤色で点滅した場合
- 長期間使用しない場合

専用充電用USBケーブルが破損または断線した場合、危険を避けるため、必ずお買い上げの販売店または(株)MTGお客様相談室、もしくは同等の有資格者に点検・修理をご依頼ください。

 **注意** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  レッグベルト2専用コントローラーに同梱の専用充電用USBケーブルは、レッグベルト2専用コントローラー専用です。他の製品には使用しないでください。また、他のケーブルをレッグベルト2専用コントローラーに使用しないでください。
- コントローラーをパソコンや周辺機器、モバイルバッテリーと接続して充電しないでください。接続した機器が故障、破損するおそれがあります。

専用充電用USBケーブル[※]についてのご注意

※専用コントローラーの付属品です

 **警告** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  コネクタやケーブルが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しないでください。
- 専用充電用USBケーブルのコネクタに液体や異物（ピン、ゴミなど）を付着させないでください。
- 端子、コネクタ部分が変形したUSBケーブルは使用しないでください。
- 収納時に専用充電用USBケーブルをコントローラーなどに巻きつけないでください。
- コード類を傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。コードを傷め、感電や故障、火災のおそれがあります。
- 濡れた手で専用充電用USBケーブルを抜き差ししないでください。感電ややけどのおそれがあります。
- 水回りでは充電しないでください。感電のおそれがあります。
- 専用充電用USBケーブルを水につけたり、濡らしたりしないでください。

 **警告** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  ACアダプターは同梱されていません。
- 充電するときは、USBコネクタ（Type-A端子）の接続先の定格出力（OUTPUT）とコントローラーの定格入力（DC5V、0.5A）を確認してください。
※定格出力が定格入力を下回る場合、接続先が高温になったり、故障の原因となったりするおそれがありますので、ご注意ください。
- 専用充電用USBケーブルは根元までしっかり差し込んでください。また、差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 専用充電用USBケーブルのほこりなどは、乾いた布で拭くなどして定期的に清掃してください。
- 専用充電用USBケーブルを抜くときは、ケーブル部分を持たず、コネクタ部分を持って抜いてください。
- 異常、故障に気付いたら、ただちに使用を中止して、コントローラーから専用充電用USBケーブルを抜き、（株）MTGお客様相談室にご連絡ください。事故や感電、発火、故障などのおそれがあります。
<異常、故障例>
- 異臭、異音がする - 煙が出る

安全上のご注意(つづき)

専用充電用USBケーブルについてのご注意(つづき)

 **警告** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  次のような状態になった場合は、ただちに使用を中止してください。そのまま使用し続けた場合、内蔵充電電池が発熱、発火、破裂するおそれがあります。
 - 充電できない
 - 充電中に以前よりも熱くなる
 - 不意に電源が切れる
 - 充電完了しても使用時間が著しく短い

 **注意** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  同梱の専用充電用USBケーブルは本品専用です。他の製品には使用しないでください。また、他のケーブルを本品に使用しないでください。
- 専用充電用USBケーブルを使用して、パソコンや周辺機器、モバイルバッテリーに接続しないでください。接続機器が故障、破損するおそれがあります。

本体や電波についてのご注意

 **警告** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  病院など、無線機器の使用が禁止された区域では、コントローラーの電源を入れないでください。


 **注意** 次の注意事項を守って、使用してください。

-  航空機内へ持ち込み可能かは、航空会社によって異なります。事前にご利用の航空会社、空港の保安部門へお問い合わせください。

使用上のご注意

本品をご使用の際は下記の内容をよくお読みください。

- 使用中に電子機器を本品に近付けないでください。電子機器が誤作動するおそれがあります。
- コントローラー取り付け部の金属部が汗などで濡れたときは、すぐに拭き取ってください。本品およびコントローラーの故障の原因になります。金属部は、傷つけないよう丁寧に拭いてください。
- 本品は、安全ピンやヘアピンなど鋭利なもので傷つけないよう、十分ご注意ください。
- 本品を使用する前に、使用部位（電極部が当たる部位とその周辺）の肌へ薬、化粧水、乳液、ボディクリームなどを塗らないでください。刺激を感じにくくなったり、本品の故障の原因になります。
- ご使用箇所の体毛は処理されていたほうが、電極部がより良く肌に密着します。ただし、脱毛当日の使用はお控えください。
- 変形などのおそれがあるため、冷やしたり、温めたりした状態で使用しないでください。また、熱湯をかけたり、サウナで使用したりなど本品に急激な温度変化を与えるような使用はしないでください。
- 本品は肌に直接着用する製品ですので、清潔にご使用ください（お手入れ方法については、本書の「ご使用後は（本品のお手入れ・保管）」をご覧ください）。

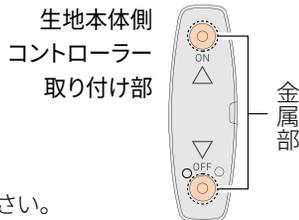

- 電極部を強くこすると色移りするおそれがありますのでご注意ください。色移りしても性能に大きな影響はありません。
- トレーニング中は、面ファスナーを開けないでください。締め付けが苦しいなど、面ファスナーでの調整が必要な場合は、必ず電源を切ってから行ってください。電極部が肌に密着できず、強い刺激や痛みを受けるおそれがあります。
- 電極の位置を調整する際、生地本体を強く引っ張らないでください。破損のおそれがあります。

コントローラー（別売）の充電について

- コントローラーは内蔵されている充電電池で動作します。初めて使用するときは、充電してから使用してください。

充電に関するご注意

- 充電中は専用充電用USBケーブルが温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし充電中に専用充電用USBケーブルに異常な過熱が発生した場合は、温度が下がるまで待つから、充電をやり直してください。
- 周囲温度が15～35℃の環境で充電してください。内蔵充電電池の性質上、低温や高温では電池性能が低下する場合があります。


ご使用のながれ

詳しくは、17～28ページをご覧ください。

準備する

初めてお使いになる
ときや、充電が切れ
たときは専用コント
ローラーを充電して
ください。

※毎回充電する必要はあ
りません。

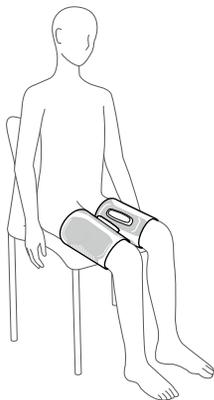

使用する

Step1 太もも全周(電極
部が当たる部位)
を湿らせる

(18ページ)



Step2 素肌に直接生地
本体を着用する

(19ページ)



Step3 専用コントローラー
を取り付ける

(20ページ)



Step4 トレーニングを
開始する

レッグベルト2のみで→21ページ
フットフィット3シリーズも同時に
→24ページ



終了する

約15分が経つと、プ
ログラムは自動的に
終了し、電源が切れ
ます。


準備する

充電する

- ACアダプターは同梱されていません。
- 専用コントローラーを充電するために、以下「ACアダプターの選び方」を満たすACアダプターをご用意ください。
- 1回フル充電すると、最大レベルで5回程度トレーニングできます(レベル20、室温23°Cの場合)。
- 充電しながらコントローラーの電源を入れることはできません。

ACアダプターの選び方

- ①定格出力(またはOUTPUT)が「DC5V」で「500mA以上」
 - ②USB Type-A端子を接続できる
- 上記①②を満たすACアダプターをご用意ください。

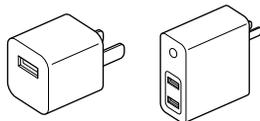


例：○「DC5V、2.0A」「DC5V、0.5A」
×「DC5V、0.3A(または300mA)」

※定格出力が500mAより小さい場合、ACアダプターが高温になったり、故障の原因となったりするおそれがありますので、ご注意ください。

1 コントローラーに付属の専用充電用USBケーブルを、図のように接続する

- 充電が開始されます。
- 専用コントローラー 1台のみ接続して充電することもできます。

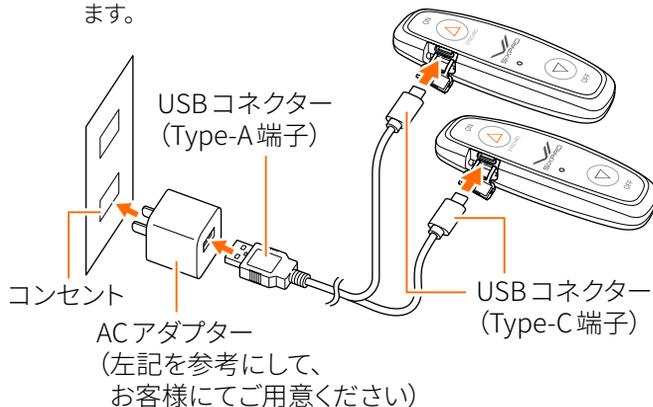

2 ランプの色で、充電の状態を確認する

- 充電中：赤に点灯
- 充電完了：消灯
- フル充電にかかる時間は約4時間です。



使用する

- 周囲に家財などが無い、安全な場所で使用してください。
- コントローラーを操作する際は、座った状態で行ってください。
- 座った状態でスタートしてください。
- プログラムのご使用回数目安：1日1回
- 1日60分以上連続して使用しないでください。
- 肌の湿り具合が不足している場合、刺激が弱く感じることがあります。肌全体をさらに湿らせてご使用ください。
- 激しい刺激や痛み、熱感や違和感を感じる場合は、直ちに使用をやめてください。
- 初めてお使いになるときは、弱いレベルで使用してください。慣れてきたら、レベルを調節していきましょう。
- 電極部は肌に密着させてください。肌と電極部の間に隙間があると、電極部全面に電気が均一に流れないため、強い刺激や痛みを感じることがあります。
- 衣類の裾や湿布、テーピング等の上から使用しないでください。電極部全体が直接肌に触れない状態で使用すると、電気が均一に流れないため、強い刺激や痛みを感じることがあります。
- コントローラーの電源が入っている間は、Bluetoothの電波が発信されています。本品のBluetooth機能はアプリとの接続に使用されます。

太もも全周(電極部が当たる部位)を湿らせる

1 ウエットティッシュ、濡らした布等で太もも全周(電極部が当たる部位)へ水分を含ませる

- ウエットティッシュはアルコールが含まれていないものをご使用ください。




両脚の素肌に生地本体を着用する

- 着用前に、生地本体に破れがないか確認してください。破れがあると、強い刺激や痛みを受けるおそれがあります。
- 椅子などに座って着用してください。
- 転倒などにご注意ください。

2 生地本体を開き、位置合わせ目印が太もも横幅の中央にくるように位置を合わせる

- 左右どちらにも着用できます。


位置合わせ目印を太もも横幅の中央に合わせる

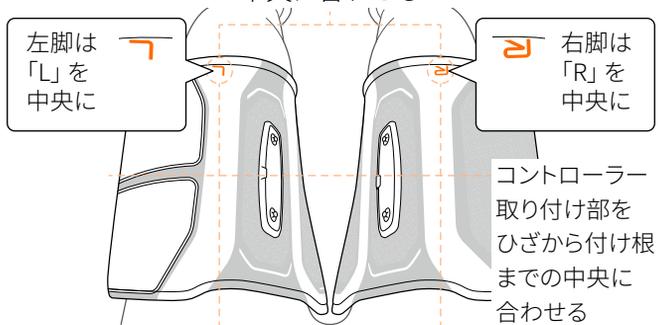

- 正しい位置で着用するとコントローラーの取り付け部が内もも側に向きます。

3 生地本体をしっかり脚に巻き付け、面ファスナーで固定する

- 電極部と肌の間にすき間ができないよう、手で押さえながら面ファスナーの貼り位置を調整してください。

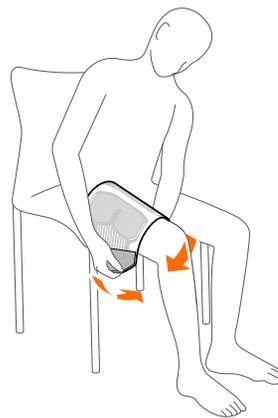


使用する(つづき)

コントローラー(別売)を取り付ける

- 本品に別売のレッグベルト2専用コントローラー以外の製品を取り付けて使用しないでください。故障のおそれがあります。
- 充電方法については、17ページ「充電する」をご覧ください。

- 1 椅子に座った状態で、コントローラーをコントローラー取り付け部に取り付ける

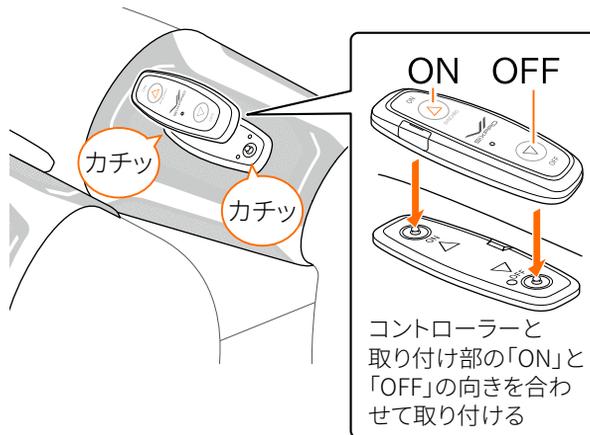

- EMS 通電スナップボタンを2つともはめる
- コントローラーと取り付け部の「ON」と「OFF」を合わせて取り付けてください。
- コントローラーは左右の区別がありません。どちらにも取り付けできます。

トレーニングする

- 座った状態でスタートしてください。
- コントローラーを操作する際は、座った状態で行ってください。



- トレーニング中に本品や身体に異常を感じた場合や、コントローラーで操作ができなくなった場合は、速やかにコントローラーを本品から外し、使用を中止してください。
- 緊急時に、コントローラーがすぐ取り外せる状態で使用してください。



レッグベルト2のみでトレーニングする


レッグベルト2では左右2つのコントローラーが自動で接続され、両脚を同時に操作できます。

この同時操作ができる接続を「シンクロ」と呼びます。



1 左右それぞれのコントローラーを近づけ、それぞれの△ボタンを長押しして、2つとも電源を入れる


- 「ピロツ」と音がして、ランプが緑に点滅したら電源が入った合図です。

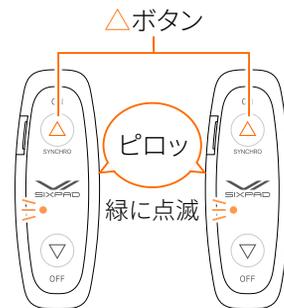

- 電源が入ると左右のコントローラーが自動でシンクロします。
- 左右シンクロ完了時は「ピピピ…(ピ音が10回)」と鳴ります。
- 今のレベルはレベル0です(刺激はありません)。

使用する(つづき)


- 2 左右どちらかのコントローラーで△ボタンを短く1回押して、トレーニングを開始する

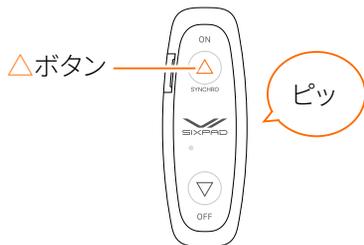

- 今のレベルはレベル1です。

- 3 左右どちらかのコントローラーで△ボタン/▽ボタンを短く押して、お好みの強さに変える

- △ボタンを短く1回押すとレベルが上がリ、▽ボタンを短く1回押すとレベルが下がります。

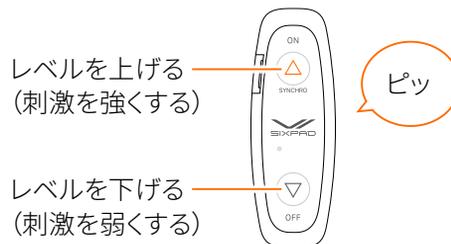

- 左右のコントローラーが連動しているため、どちらか片方で操作すると、左右両方のレベルが変わります。
- 刺激のレベルは、レベル1(弱)～20(強)の20段階です。
- 約15分間経つと、「ピー」と音がして自動で終了します。トレーニング途中で終了したいときは▽ボタンを約2秒押し続けてください。

左右で別々のレベルにするときは

- ① 左右どちらかのコントローラーの△ボタンと▽ボタンを同時に短く押す(「ピッ」と鳴る)
 - レベル変更が操作していない方のコントローラーには反映されなくなります。
 - この設定はトレーニング中でも行えます。
- ② 左右それぞれのコントローラーでレベルを調整する。
 - 電源を切ると、レベル変更は左右連動に戻ります。

- シンク解除、再接続については27ページを参照ください。

使用する(つづき)

レッグベルト2とフットフィット3で同時にトレーニングする

レッグベルト2をフットフィット3とシンクロさせると、プログラム進行を同期させて、レッグベルト2とフットフィット3を同時使用でトレーニングできます。


※レベル調整はレッグベルト2とフットフィット3でそれぞれ別に行います。

※同時トレーニングはフットフィット3 ヒートでも可能です。



1 レッグベルト2の左右それぞれのコントローラーで、それぞれの△ボタンを長押しして、2つとも電源を入れる

- 「ピロツ」と音がして、ランプが緑に点滅したら電源が入った合図です。

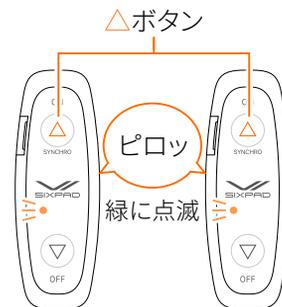


- 電源が入ると左右のコントローラーが自動でシンクロします。
- 左右シンクロ完了時は「ピピピ…」(ピ音が10回)」と鳴ります。
- 今のレベルはレベル0です(刺激はありません)。

2 フットフィット3に両脚を乗せ、△ボタンを長押しして、電源を入れる



- フットフィット3本体の△ボタンでも同様に操作できます。


3 すべての電源を入れてから2分以内に、レッグベルト2の左右どちらかのコントローラーで△ボタンを長押しして、レッグベルト2とフットフィット3をシンクロさせる

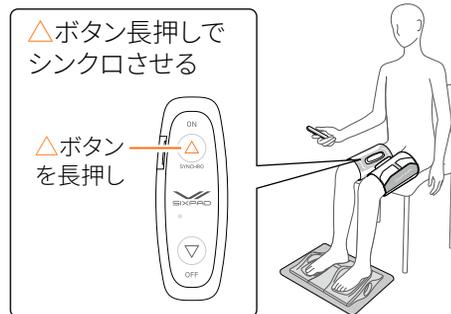

- フットフィット3とのシンクロ完了時はレッグベルト2のコントローラーから「ピポピポ… (ピポ音が5回)」と鳴ります。
- 一度シンクロすると、電源を切ってもシンクロは維持されます。次回以降のトレーニング時は本手順は不要です。

使用する(つづき)


- 4 フットフィット3のプログラムがTraining(トレーニング) またはConditioning(コンディショニング) になっていることを確認してから、どちらかの△ボタンを短く押して、トレーニングを開始する

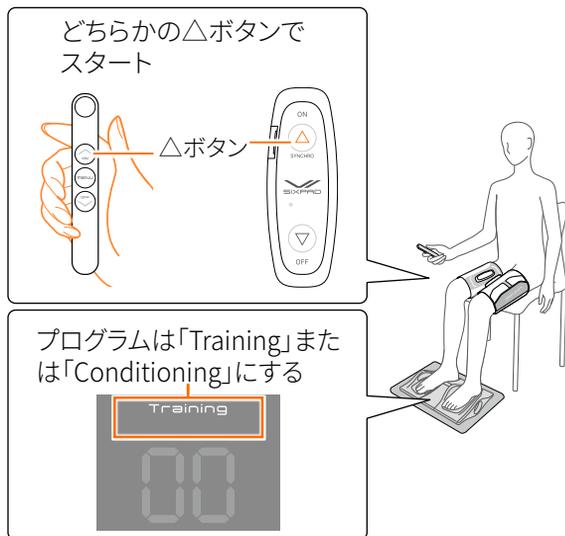

- 今のレベルはレベル1です。
- フットフィット3 ヒートをご使用時は、プログラムが「Walking」になっていると同時トレーニングができません。

- 5 レッグベルト2とフットフィット3それぞれで△ボタン/▽ボタンを押して、レベルを調整する

- レッグベルト2とフットフィット3のレベル変更は連動していませんので、それぞれでレベルを変更します。
- 約15分間経つと、「ピー」と音がして自動で終了します。トレーニング途中で終了したいときは、どちらかの▽ボタンを約2秒押し続けてください。

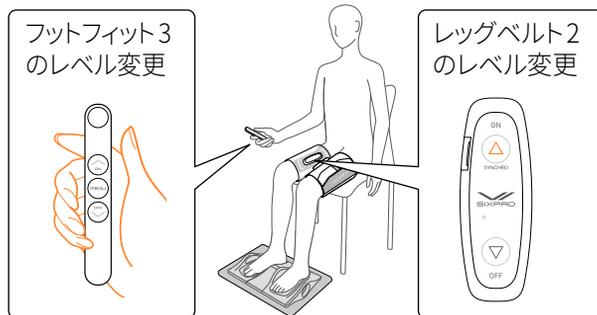

レッグベルト2の左右のシンク口を解除するには

- ① 左右それぞれのコントローラーの電源を入れる。(△ボタンを長押し)
- ② 左右両方の電源が入った状態で、左右どちらかのコントローラーの△ボタンと▽ボタンを同時に長押しする(「ピピピッ」と鳴る)



- 電源が切れて、再度電源を入れても、左右のシンク口は解除されたままです。
- フットフィット3とシンク口させていた場合は、一緒に解除されます。

再び左右をシンク口させるには

左右それぞれのコントローラーの電源を入れ、左右どちらかの△ボタンを長押しする。(「ピピピ…(ピ音が10回)」と鳴る)

- この設定はトレーニングを始める前にもみ行えます。

フットフィット3とのシンク口を解除するには

- ① 左右それぞれのコントローラーの電源を入れる。(△ボタンを長押し)
- ② 左右両方の電源が入った状態で、左右どちらかのコントローラーの△ボタンと▽ボタンを同時に長押しする(「ピピピッ」と鳴る)



- 解除のときは、フットフィット3の電源を切ったままでも、解除できます。
- レッグベルト2の左右のシンク口も一緒に解除されます。
- 電源が切れて、再度電源を入れても、シンク口は解除されたままです。

再びフットフィット3とシンク口させるには

レッグベルト2(左右両方のコントローラー)、フットフィット3すべての電源を入れ、レッグベルト2の左右どちらかの△ボタンを長押しする。(「ピポピポ…(ピポ音が5回)」と鳴る)


- この設定はトレーニングを始める前にもみ行えます。

使用する(つづき)


終了する

- 脱いだ生地本体および取り外したコントローラーを小さなお子様の手の届くところやペットの近くに置かないでください。
- 汗などで手が濡れていたら、必ずよく拭いてからコントローラーを取り外してください。感電のおそれがあります。

- 1 コントローラーのランプが消灯して、電源が切れていることを確認する
- 2 コントローラーを生地本体から外す

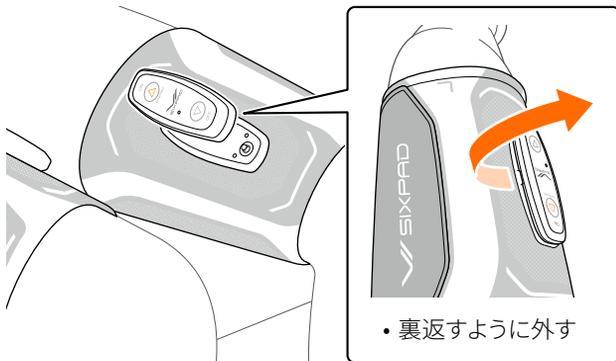

- 3 面ファスナーをはずして、生地本体を脱ぐ

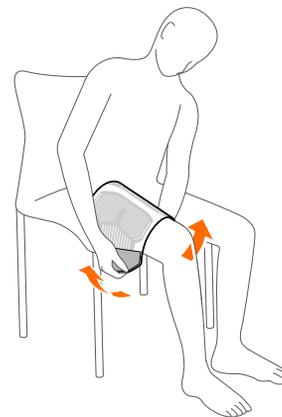

- 脱ぐときに、コントローラー取り付け部やその周囲の生地を引っ張らないでください。

トレーニングのあとは


- 糖質やたんぱく質などの栄養補給や水分補給、適切な休息をおすすめします。

ご使用後は(本品のお手入れ・保管)

生地本体を洗濯する

本品は水分を含ませた肌に直接着用する製品です。
衛生のため、毎使用後に洗濯してください。

- 電極部を強くこすったり、折り曲げたりしないでください。電極部を傷つけたり、色移りしたりするおそれがあります。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。
- 製品の特質上、色落ちする場合があります。他のものと一緒に洗濯しないでください。

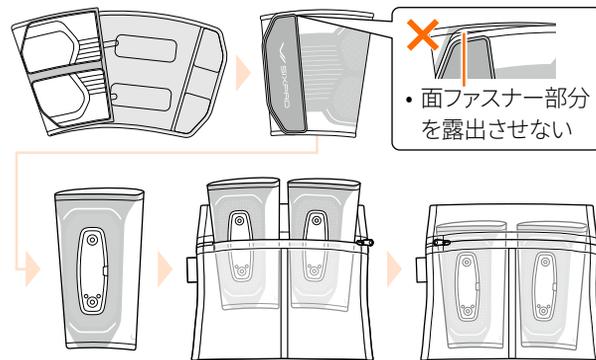

- 1 コントローラーが取り外してあることを確認する
 - コントローラーを取り付けたまま洗濯すると、故障の原因になります。
- 2 面ファスナーを閉じて付属の洗濯ネットに入れる
 - 図のように面ファスナーを貼り付けてから、さらに生地本体を2つ折りにし、洗濯ネットの仕切りの左右に1枚ずつ、生地本体を挿入します。

- 3 衣類用の中性洗剤を使い、洗濯機でデリケート洗いをする
 - 塩素系漂白剤、酸性洗剤、柔軟剤などは使用しないでください。
 - 手洗いの場合は、面ファスナーを取り付けた状態で押し洗いしてください。もみ洗い、こすり洗いはしないでください。
- 4 遠心脱水は短時間で行う
 - 脱水後、濡れたままで放置しないでください。シミができるおそれがあります。
 - 手洗いの場合は面ファスナーを開け、乾いたタオルなどで押しながら水気を拭き取ってください。ねじり絞りはしないでください。
- 5 面ファスナーを開き、直射日光を避けて陰干しする
 - タンブル乾燥機は使用しないでください。
 - アイロンはかけないでください。
 - 保管時は、本体の生地がこすれないようにしてください。


ご使用後は(本品のお手入れ・保管) (つづき)

専用コントローラーをお手入れする

- お手入れは、電源が切れていることを確認してから行ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。
- 水分がかからないようご注意ください。

1 コントローラーが傷付かないよう柔らかい布で汗や湿気を丁寧に拭き取る

- コントローラー裏側の金属部は、こすらないようご注意ください。

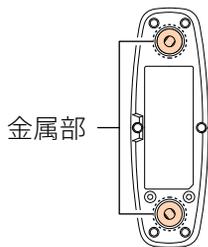

2 風通しの良い日陰で自然乾燥させる

保管時のご注意

- 高温・多湿の場所(車中など)を避け、直射日光の当たらないところで保管してください。
- 湿気の少ないところに保管してください。浴室内などに放置すると、本品内部で結露やサビが発生する原因になります。
- 火気の近くで保管しないでください。
- 保管前に生地本体を洗濯する場合は、しっかり乾いてからたたんで保管してください。電極部が濡れた状態で他の金属部に触れたまま保管すると、触れた部分が錆びるおそれがあります。
- 小さなお子様の手の届くところやペットの近くに置かないでください。
- 長期保管時に、折りたたんだまま重量物をのせた状態で保管しますと、ヘタリやシワの原因になりますのでご注意ください。
- しばらく使用しない場合は、必ず専用充電用USBケーブルをコントローラーから抜いて保管してください。ほこりや湿気が原因となり、漏電火災のおそれがあります。

本品を廃棄する場合は

- 各自治体が指定している廃棄方法に従ってください。

お知らせ

プログラム・メニューについて

筋肉に効率よくアプローチするため、刺激が自動的に切り替わります。

・トレーニング・プログラム(約15分間)

30秒 ウォームアップ 刺激のテンポが次第に加速します。

4分 トレーニング 刺激のあいだに休止をはさみます。

1分 コンディショニング*

4分 トレーニング

1分 コンディショニング*

4分 トレーニング

30秒 クールダウン 刺激のテンポが次第に減速します。

*「コンディショニング」は、リズムカルな刺激を繰り返します。

レベル調節のめやす

刺激を感じるレベルは、筋肉のつき方や運動頻度によって異なります。初めてお使いになるときは、レベル1など弱いレベルで使用してください。慣れてきたら、レベルを調節していきましょう。

※ 慣れていない状態でレベルを強くし過ぎると、筋肉痛になることがあります。

• 適切なレベルを探す際は、レベルを1つずつ上げて、レベルを上げるごとに刺激の感じ方を確かめてください。適切なレベル以上に高いレベルで使用しても、よりトレーニングでできるわけではありません。

お知らせ(つづき)

音の種類と意味

音の種類	意味
ピロツ	電源が入った
ピー	電源が切れた トレーニングが中止／終了された
ピツ	レベル調節された レベル変更の左右連動が解除された
ピピツ	レベル20 /レベル1に達した
ピツ、ピツ (連続音)	肌検知できていない →以下のことをご確認ください ・トレーニングウェアなどの裾で電極部を覆っていませんか？ ・肌が電極部に密着していますか？ ・肌が乾燥していませんか？

音の種類	意味
ピピピピ (連続音)	内蔵充電電池の残量がない →コントローラーを取り外して充電してください。音を止めるには充電するか、「ピー」と音がするまで▽ボタンを押し続けてください。
ピー、ピー、ピー (トレーニング終了後)	内蔵充電電池の残量が少ない →次回のトレーニングまでにコントローラーを充電してください。この音は▽ボタンを押すと止まります。
ピー (高) ピー (低) (連続音)	エラーが検知された →電源を入れ直してもエラーが検知される場合は、(株) MTG お客様相談室にお問い合わせください。

音の種類	意味
ピピピ… (ピ音が10回)	左右のレッグベルト2間でのシンク口 接続開始
ピポピポ… (ピポ音が5回)	フットフィット3 ヒート/フットフィット3 とのシンク口接続開始
ピピピッ	全てのシンク口状態を解除

ランプの光り方と意味

光り方	意味
緑点滅 (ゆっくり)	トレーニング中
緑点滅 (1秒おきに 点灯、消灯)	肌検知中
赤に点灯	充電中
赤に点滅	充電エラー 何度も発生する場合は、充電を中止し、 (株) MTG お客様相談室までご相談ください。
消灯	充電終了 トレーニング中止／終了 電源切
緑に点灯 (3秒間)	シンク口完了時
緑点滅(速い)	シンク口接続する機器を捜索中

お知らせ(つづき)

コントローラー(別売)のBluetooth®機能使用上の注意

- コントローラーのBluetooth機能は、日本国内規格に準拠し、認証を取得しています。コントローラーを改造したり、コントローラー記載の認証番号を消したりしないでください。電波法に抵触するおそれがあります。
- コントローラーの使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジや他の産業・科学・医療用機器以外にも、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と表記します)が運用されています。
 1. コントローラーを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、コントローラーと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、コントローラーの使用場所を速やかに変えるか、またはコントローラーの運用を停止(電波の発射を停止)してください。
 3. 不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、(株)MTG お客様相談室までお問い合わせください。
- この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。

2.4FH1

- 無線通信時のセキュリティとして、弊社独自仕様のセキュリティ機能を施しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分満たされない場合があります。Bluetoothによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 通信中はICカードなど他の通信媒体や金属、磁石など磁界を発生させるものを、近づけないでください。故障やデータ破損の原因になります。
- コントローラーを使用する前に、スマートフォンの取扱説明書をよくお読みください。
- 利用可能なチャネルは国により異なります。ご利用の国によっては、Bluetooth機能の使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。
- コントローラーはすべてのスマートフォンとの接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのスマートフォンとの動作を保証するものではありません。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社MTGはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

コントローラー（別売）の内蔵充電電池の寿命について

- 内蔵充電電池は消耗品です（保証はお買い上げ日から1年間です）。
- 充電しても使用時間が極端に短い場合、内蔵充電電池の寿命の可能性があります。充電可能な回数の目安は約500回です（内蔵充電電池の寿命は使用・保管状況などで変化します）。
- 長期間使用しない場合は、コントローラーをフル充電してから保管してください。また3か月に一度はフル充電してください。内蔵充電電池が劣化し、充電ができなくなることがあります。
- 内蔵充電電池は交換できません。

故障かな？と思ったら

状態	考えられる原因	対処法
電源が入らない	コントローラーの内蔵充電電池の残量がない。	充電する。それでも症状が改善しない場合は、内蔵充電電池の寿命が考えられるため、お客様相談室までご相談ください。
	ボタンを押す時間が短い。	コントローラーの△ボタンを約2秒押し続ける。
	低温・高温の環境下で使用した。	推奨使用環境温度(15～35℃)で使用する。
充電できない (ランプが赤色で点滅)	充電エラーが検知された。	内蔵充電電池に問題がある可能性があります。何度も充電エラーが発生する場合は、(株)MTG お客様相談室までお問い合わせください。
音が鳴り止まない 「ピツ、ピツ」	衣類などの裾や湿布、テーピングなどが肌と電極部の間にはさまった状態で使用している。	肌に電極部全体が直接接触するようにする。 電源を切ってから、衣類の裾などを生地本体と肌の間から出す。 湿布やテーピングなどは剥がす。
	肌にクリームなどを塗っている。	拭き取ってから、生地本体を着用する。
	電極部が肌にしっかり押し当てられていない。	面ファスナーをきつめに貼り直す。 電極部の位置を少しずつ調整する。
	着用部の肌(電極部が触れる付近)が乾燥している。	蒸しタオル、濡らした布等で電極部が当たる付近の肌へ水分を含ませる。

状態	考えられる原因	対処法
音が鳴り止まない 「ピピピピ」	コントローラーの内蔵充電電池の残量がない。	充電する。それでも症状が改善しない場合は、内蔵充電電池の寿命が考えられるため、お客様相談室までご相談ください。
音が鳴り止まない 「ピー（高）ピー（低）」（連続音）	エラーが検知された。	電源を入れ直してもエラーが検知される場合は、(株) MTG お客様相談室にお問い合わせください。
音が鳴り止まない 「ピー、ピー、ピー」 （トレーニング終了後）	内蔵充電電池の残量が少ない。	次回のトレーニングまでにコントローラーを充電してください。この音はいずれかのボタンを押すと止まります。

故障かな？と思ったら(つづき)

状態	考えられる原因	対処法
電気刺激が弱い、または感じない	電極部が肌にしっかり押し当てられていない。	面ファスナーをきつめに貼り直す。
		電極部の位置を少しずつ調整する。
	着用部の肌(電極部が触れる付近)が乾燥している。	蒸しタオル、濡らした布等で電極部が当たる付近の肌へ水分を含ませる。
	電源が入っていない。	コントローラーの△ボタンを約2秒押し続ける。
	プログラムを開始していない。	コントローラーの電源を入れたあと、メニューを選び、コントローラーの△ボタンを短く押す。
	レベル設定が低い。	コントローラーの△ボタンを短く押して、レベルを上げる。
	衣類などの裾や湿布、テーピングなどが肌と電極部の間にはさまった状態で使用している。	肌に電極部全体が直接触れるようにする。 電源を切ってから、衣類の裾などを生地本体と肌の間から出す。 湿布やテーピングなどは剥がす。
	寒く、乾燥した環境で使用している。	使用場所を暖かい環境に変更する(特に冬場などの寒く、乾燥した環境では肌が乾燥しやすくなり、電気刺激をピリピリと感じる原因となる可能性があります)。

状態	考えられる原因	対処法
電気刺激が途中で止まる	コントローラーの内蔵充電電池の残量がない。	充電する。それでも症状が改善しない場合は、内蔵充電電池の寿命が考えられるため、お客様相談室までご相談ください。
電気刺激が強い (ピリピリする)	レベル設定が高い。	コントローラーの▽ボタンを短く押して、レベルを下げる。
	電極部が肌にしっかり押し当てられていない。	面ファスナーをきつめに貼り直す。
		電極部の位置を少しずつ調整する。
	寒く、乾燥した環境で使用している。	使用場所を暖かい環境に変更する(特に冬場などの寒く、乾燥した環境では肌が乾燥しやすくなり、電気刺激をピリピリと感じる原因となる可能性があります)。
	着用部の肌(電極部が触れる付近)が乾燥している	蒸しタオル、濡らした布等で電極部が当たる付近の肌へ水分を含ませる。
生地本体の電極部が汚れている。	29ページ「ご使用後は(本品のお手入れ・保管)」を参照してお手入れしてください。	

故障かな？と思ったら(つづき)

レッグベルト2 どうしの左右接続について

状態	考えられる原因	対処法
左右のレベルが一緒に変わらない (片方の刺激だけ変わらない)	レッグベルト2 どうしがシンクロ接続できていない。	左右両方のレッグベルト2の電源を入れ直す。
電源を入れたときに、 レッグベルト2 左右が 自動でシンクロしない (「ピピピ…(ピ音が 10回)」が鳴らない)	シンクロ接続が失敗している。	①レッグベルト2両側の電源を入れ直す。 ②△ボタンを約2秒長押しする。 →「ピピピ…(ピ音が10回)」と音が鳴れば、シンクロ接続が成功しています。
	シンクロ設定が解除されている。	
左右のレベルを別々に変えられない (両方の刺激が同時に変わる)	故障ではありません。	レッグベルト2は通常時、左右のレベルが連動します。
	左右のシンクロ接続を解除できていない。	「左右で別々のレベルをするときは」(23ページ)をご覧ください。

レッグベルト2とフットフィット3の接続について

状態	考えられる原因	対処法
フットフィット3 (両足) とレッグベルト2 (両太もも) が同時にスタートできない	フットフィット3とレッグベルト2がシンクロしていない。	フットフィット3とレッグベルト2両方の電源を入れ直す。
フットフィット3とレッグベルト2のレベルが同時に変わらない (片方の刺激だけ変わらない)	故障ではありません。	フットフィット3との接続では、プログラムが進むタイミングは一緒になりますが、レベル変更はそれぞれで行います。 レッグベルト2のコントローラー、フットフィット3のリモコンでレベルを変更してください。
フットフィット3とシンクロ接続されない	フットフィット3とレッグベルト2のシンクロが失敗している。	再度シンクロ設定をしてください(25ページ)。
	フットフィット3とレッグベルト2のシンクロが解除されている。	レッグベルト2のみでもシンクロを解除すると、フットフィット3とのシンクロも解除されます。この場合は再度シンクロ設定をしてください(25ページ)。
レッグベルト2とフットフィット3で刺激の種類が違う	フットフィット3のメニューがConditioningになっている(故障ではありません)。	フットフィット3にはトレーニング・プログラムとコンディショニング・プログラムがあり、コンディショニング・プログラムでは刺激の種類が異なります。

仕様一覧

生地本体

商品名	SIXPAD Leg Belt 2 (シックスパッド レッグベルト2)
品番	SE-CM
ターゲット 寸法 (太もも周囲)	S-M : 44-53cm M-L : 54-64cm
推奨使用 環境温度	15 ~ 35°C

材質	<ul style="list-style-type: none">■身生地：ポリエステル88%、 ポリウレタン12%■電極部：ポリウレタン、カーボン■プレート部：ポリプロピレン、ステンレス■洗濯ネット：ポリエステル100%
同梱品／付 属品	<ul style="list-style-type: none">■同梱品：生地本体 (2)■付属品：洗濯ネット (1)、 取扱説明書 (保証書付き) (1)
製造元	株式会社 MTG (日本) 原産国：ベトナム

専用コントローラー(別売)

商品名	SIXPAD Leg Belt 2 Controller (シックスパッド レッグベルト2専用コントローラー)
品番	SE-CO
質量	約33g
製品寸法	約101×36×15mm
推奨使用環境温度	5～35℃
材質	■本体：ABS樹脂 ■EMS通電スナップボタン：真鍮
同梱品／付属品	■同梱品：レッグベルト2専用コントローラー(2)、 専用充電用USBケーブル(1) ■付属品：取扱説明書(保証書付き)(1)
消費電力	約1.6W(充電時)

電源方式	充電式
使用蓄電池	リチウムイオンポリマー電池
定格入力	DC5V、500mA
充電用USBケーブル長さ	約0.5m
充電時間	約4時間
動作可能回数	約5回(レベル20、室温23℃の場合)
製造元	株式会社MTG(日本) 原産国：中国

※ 製品の性能向上のため、仕様の一部を予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

保証・アフターサービス

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。

保証について

保証書は必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになったあと、大切に保管してください。

保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

※使用中に異常が生じたときは、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室へお問い合わせください。

補修用性能部品の最低保有期間

本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

● 保証期間中

お買い上げになってから1年間は保証書記載の内容に基づき無償修理いたします。お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室まで保証書をご提示のうえ、ご依頼ください。

● 保証期間(1年間)が過ぎているとき

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、または(株)MTGお客様相談室までお問い合わせください。お客様のご要望により有償修理いたします。

無償修理規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に保証書に記載している保証内容に該当する症状が発生した場合には、無償修理をさせていただきます(付属品を除く)。
 - 無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に本品と本書をご持参、ご提示いただきお申しつけください。
 - お買い上げの販売店で無償修理をご依頼できない場合には、(株)MTGお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - 車両、船舶などに搭載された場合の故障及び損傷
 - 保証書の提示がない場合
 - 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷
 - 使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷
 - 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障及び損傷
 - 布地の破れ、ほつれ、ピリング、面ファスナーの摩耗など通電機能以外の消耗品損傷
- 保証書は購入した国・地域においてのみ有効です。

4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- ※ お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号) は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※ 保証書は明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社MTG

<https://www.mtg.gr.jp>

[お客様相談室]

MTG 製品のお問い合わせ・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記までお問い合わせください。

 0120-315-765

<https://www.mtg.gr.jp/feedback/>

